




Covid-19 AG-Schnelltests

Die **NEUEN** DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette – Antigen Schnelltests

Zuverlässig und rasch

Die DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette ist ein immunchromatographischer in-vitro-Test für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nukleokapsid-Protein-Antigenen in nasopharyngealen (NP) oder anterior nasalen Abstrichproben. Der Test soll die schnelle Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen ermöglichen. Der DIAQUICK COVID-19 Ag Test unterscheidet nicht zwischen SARS-CoV und SARS-CoV-2.

20 Tests per Packung – jetzt mit vorgefüllten Extraktionsröhrchen!

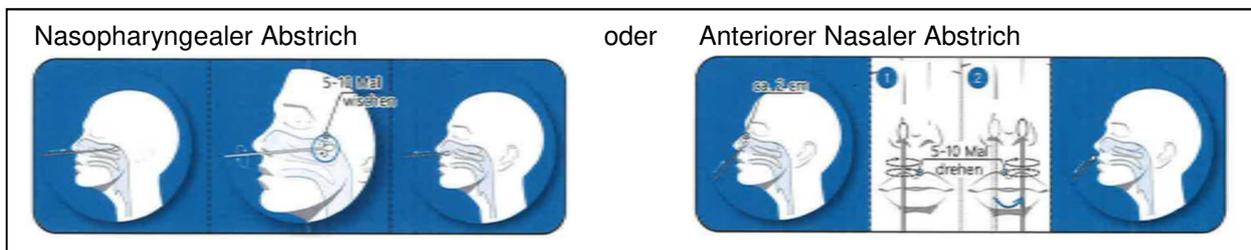

PROBENGEWINNUNG UND VORBEREITUNG

- Den im Kit mitgelieferten Tupfer verwenden.
- Führen Sie den Tupfer vorsichtig in das Nasenloch des Patienten ein, bis Sie – lt. Abbildung – die Oberfläche des vorderen oder hinteren Nasen-Rachenraums berühren.
- Tupfer vorsichtig über die Oberfläche des Nasen-Rachenraums reiben, und dabei den Tupfer vorsichtig mehrmals drehen.
- Entfernen Sie den Tupfer langsam aus der Nasenhöhle.



Test ist einfach und gebrauchsfertig.

Auswertung nach 15 Minuten.

Packung: 20 Test

DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette - Inhalt

- 20 Testkassetten, einzeln verpackt in Folienbeuteln mit einem Trockenmittel (20x REF GCCOV-502a)
- 20 Extraktionsröhrchen, mit Pufferlösung vorgefüllt, steril versiegelt
- 20 sterile Tupfer
- 1 Papierständer
- 1 Beipacktext



Bestellnummer	Packung	ab 10 Packungen
Z20601CE	€ 84,00	€ 77,00

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Fa. KÄB.